

Краткое руководство пользователя госпитальной системой OneTouch® Verio® Pro+

Обеспечивает безопасность, надежность и простоту тестирования в условиях применения в ЛПУ

Проведение теста для определения уровня глюкозы крови*

1. Для включения глюкометра вставьте тест-полоску



Вставьте ТП¹ в порт глюкометра золотистой стороной и серебристыми кончиками к себе.

Не требует кодирования.



На экране не появится «Нанесите кровь»

2. Получение образца крови²



Очистите место прокола водой с мылом, промойте и вытрите насухо.

Проколите кончик пальца одноразовым скарификатором и, мягко сдавливая, получите круглую каплю цельной крови.

3. Нанесите каплю крови на тест-полоску (с кончика пальца или из шприца)



Нанесите образец крови с пальца на ТП¹ можно с любой стороны к пиллярной зоне



Снимите иглу со шприца. Аккуратно нажмите на поршень, чтобы появилась капля крови. Нанесите её на любую сторону ТП¹.

4. Просмотр результата



На экране глюкометра появится результат.

Когда появится надпись «Смотрите предыдущий»:

> Нажмите , чтобы посмотреть предыдущий результат;

> Затем нажмите , чтобы скрыть предыдущий результат.

5. Удаление использованной ТП¹



Наклоните глюкометр вниз, держите его над контейнером для биологических отходов, и нажмите , чтобы ТП¹ выпала в контейнер.

Дезинфекция глюкометра после каждого пациента

Шаг №1



Чтобы полностью **очистить** поверхность глюкометра и удалить все органические загрязнения, используйте мягкую ткань/салфетку, смоченную рекомендованным дезинфицирующим средством.

Шаг №2



Чтобы **продезинфицировать** ГМ³ используйте новую ткань/салфетку. Хорошо отожмите ткань, чтобы удалить излишки раствора. Убедитесь, что поверхности остаются влажными в течение времени, которое указано на упаковке по дезинфекции.

Возвращение к предыдущему экрану
(нажмите и отпустите)

Главное меню
(нажмите и удерживайте)

Выделение/изменение информации или значений
(нажмите и отпустите)



Кнопка для извлечения тест-полоски
(нажмите и отпустите)

Подтверждение выбора меню
(нажмите и отпустите)

Включение глюкометра
(нажмите и удерживайте, пока не появится стандартный экран)

Выключение глюкометра
(нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд)

ONETOUCH® Verio® Pro+

Перед использованием ознакомьтесь с руководством пользователя глюкометра OneTouch® Verio® Pro+

² Для получения образцов венозной и артериальной крови ознакомьтесь с соответствующими указаниями в Руководстве пользователя глюкометра OneTouch® Verio® Pro+.
¹ Десятипроцентный раствор гипохлорита натрия или салфетки, пропитанные минимум 0,55% раствором гипохлорита натрия. Более подробная информация содержится в Руководстве пользователя глюкометра OneTouch® Verio® Pro+.

Краткое руководство пользователя госпитальной системой OneTouch® Verio® Pro+

Обеспечивает безопасность, надежность и простоту тестирования в условиях применения в ЛПУ

Проведение теста с контрольным раствором

1. Выберите уровень КР⁴



Уровень контрольного раствора указывается на этикетке и отличается цветом колпачка и этикетки.

2. Вставьте тест-полоску и подготовьте контрольный раствор



Вставьте ТП¹ в порт глюкометра, обращенную золотистой стороной и серебристыми кончиками к себе.

Не требует кодирования.



На экране не появится «Нанесите кровь».


3. Нанесение образца на ТП¹




Выделите плюсом КР⁴ в углублении кончика колпачка. Прикоснитесь к колпачку пиллярным ТП¹ к плечу створки и подождите, пока он не заполнится полностью.

Глюкометр автоматически определит КР⁴.

4. Выбор уровня контрольного раствора

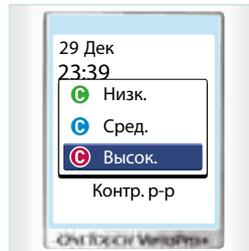

Глюкометр отсчитывает от 5 до 1, и на экране не появятся 3 уровня. Нажмите или для выбора нужного уровня и нажмите .

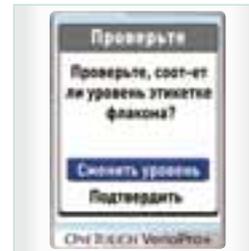

Если появляется «Проверьте»: > Вы выбрали неверный уровень. Выберите «Сменить уровень» **или**

> Результат не соответствует уровню КР⁴, который Вы используете. Выберите «Подтвердить» и выполните тест еще раз. Если надпись снова появится, не используйте ГМ³, ТП¹ или КР⁴.⁵

5. Просмотр результата




Кроме выбора уровня КР⁴, на экране не появится результат тестирования. Нажмите , чтобы удалить ТП¹.

Не используйте раствор с истекшим сроком годности или датой утилизации независимо от того, какая из двух наступает раньше.

Настройка напоминаний о тестах с контрольным раствором


Шаг №1

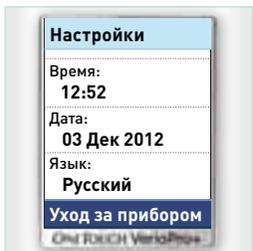

Нажмите и удерживайте , чтобы включить ГМ³, затем нажмите , чтобы перейти в основное меню и выберите «Настройки».


Далее «Уход за прибором» и нажмите .

Шаг №2

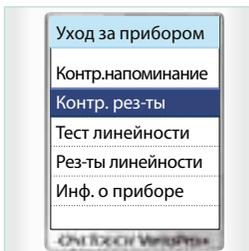


Выберите «Контр. напоминание» и нажмите .

Шаг №3

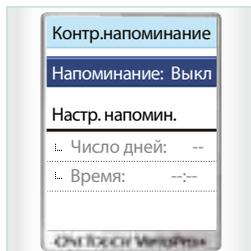


Нажмите , выберите в «Напоминание».

Шаг №4

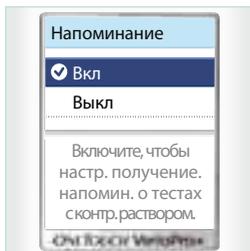


Выберите «Вкл» и нажмите .

Шаг №5

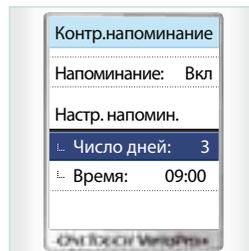


Выберите «Число дней» и нажмите , затем нажмите или для выбора желаемого количества дней между процедурами теста с КР⁴ и нажмите .

Шаг №6

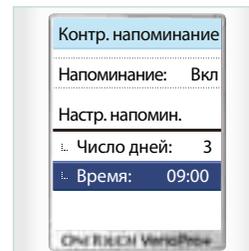

Выберите «Время» и нажмите , затем нажмите или для выбора желаемого времени появления напоминания и нажмите .

Напоминание

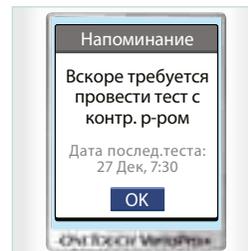

В течение 8-часов после выбора новой уставки напоминания, надпись «Напоминание» будет появляться при включении ГМ³.

ТП¹ – тест-полоска ГМ³ – Глюкометр КР⁴ – Контрольный раствор ⁵ Если надпись «Проверьте» появляется снова и снова, обратитесь к горячей линии или к представителю компании LifeScan.