

**Фирма – изготовитель:**  
Microlife AG  
Espanstrasse 139  
CH-9443 Widnau/ Switzerland  
Tel. +41 71 727 7030  
Fax +41 71 727 7039  
www.microlife.com

IB-M-L-antiflex RU 2008

**Поставщик:**  
ЗАО "Альфа-Медика"  
г. Москва  
ул. Авангардная, 3  
тел.: (495) 645-8699  
www.alpha-medica.ru

**Телефон горячей линии «MICROLIFE»:**  
Для Москвы: 645-87-01 Для России: 8 (800) 200-33-22

Дата продажи: \_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_ г.

Печать торговой организации



### Манжета универсального M-L размера (wide range)

<b>RU</b>	Область применения	1
	Комплект поставки	1
	Выбор размера	2
	Правила эксплуатации	3
	Хранение и уход	4
	Гарантия	5
	Адреса сервисных центров	6



*microlife*

*microlife*<sup>®</sup>  
Мой новый мир!

### Манжета универсального M-L размера

**RU**

#### Уважаемый покупатель!

Швейцарская компания MICROLIFE благодарит Вас за покупку манжеты для цифровых измерителей артериального давления и частоты пульса. Мы уверены, что, оценив качество, надежность и достоинства манжеты, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.

#### Область применения

Манжета предназначена для использования с приборами для измерения артериального давления фирмы MICROLIFE.

#### Комплект поставки

1. Манжета универсального M-L размера.
2. Соединительная трубка.
3. Коннектор для соединения с автоматическим измерителем артериального давления.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.


### Манжета универсального M-L размера

**RU**

#### Выбор правильного размера манжеты


Использование манжеты, не соответствующей размеру руки пользователя, искажает результат измерения артериального давления.

Если манжета мала, результат измерения будет завышен. Если велика – занижен. Манжета универсального размера подходит людям с окружностью руки 22-42 см., а значит большинству пользователям тонометрами MICROLIFE. Если индикатор в виде  $\Delta$  указывает на зону «OK», то это значит- манжета подходит по размеру и ей можно пользоваться.

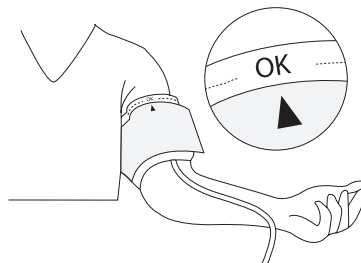

## Правила эксплуатации

1. Вставьте коннектор соединительной трубки в разъем, расположенный на боковой панели прибора.
2. Наложите манжету на руку на расстоянии 2 см выше локтевого сгиба. Не закатывайте рукава одежды, так как это может помешать току крови в сосудах, и не выполняйте измерения в одежде из плотной ткани.
3. Плотнo, с учетом конусности руки, закрепите манжету. Накачка плохо закрепленной или незакрепленной манжеты может привести к некорректным результатам и ее разрыву.
4. Убедитесь в том, что трубка нагнетания воздуха в манжету находится над локтевой ямкой.
5. Выполните измерение артериального давления как описано в руководстве по эксплуатации Вашего прибора.

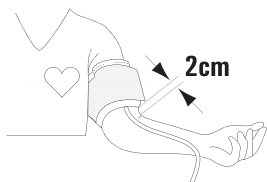

3

microlife

## Манжета универсального M-L размера

RU

## Гарантийные обязательства

Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и № 471 ГК РФ и статьей № 19 п. 3 Закона «О защите прав потребителей» (с изменениями от 27 октября 2007 года).

**Гарантийный срок эксплуатации манжеты – 1 год.**

В случае обнаружения производственного дефекта покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена манжеты в течение всего гарантийного срока. Гарантийные обязательства действительны только при соблюдении правил эксплуатации.

**Высокое качество данной продукции подтверждено Регистрационным удостоверением Министерства Здравоохранения РФ ФС №2006/89**

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы равен 3 годам при условии, что данный продукт используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по применению.

**Срок службы – срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению.**

5

microlife

## Хранение и уход

Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок. Оберегайте манжету и соединительную трубку от острых предметов.

Тип манжеты	Описание
Универсальная M-L (wide range)	Универсальная манжета для окружности руки 22-42 см
<b>Условия эксплуатации</b> Температура Влажность	От + 10°C до + 40 °C От 15% до90%
<b>Условия хранения</b> Температура Влажность	От - 10°C до + 60 °C От 15% до 90%

4

microlife

## Сервисные центры Microlife

RU

<b>Москва</b> ООО "Альфа-Сервис", ул. Петра Романова, 6, тел.: (495) 679-96-96	<b>Казань</b> ООО "Альфа-Медика Казань" ул. Чистопольская, 75, оф. 17, тел.: (843) 527-79-22	тел.: (383) 22-72-122
<b>Санкт-Петербург</b> ООО "Микролайф-Север", Южное шоссе, д. 37 корп. 1, литера В, пом. 15, тел.: (812) 493-24-02	<b>Калининград</b> ООО "Медиком Плюс", ул. Севастьянова, д. 3/5, оф. 27 тел.: (4012) 53-32-73	<b>Оренбург</b> ООО "Эко-Мост", Ул. Джангильдина, д. 11, тел.: 8 905 819-86-17
<b>Барнаул</b> ООО "Форт Медтехника ЛТД" ул. Чапаева, 53а, тел.: (3852) 24-33-18	<b>Калининград</b> ИП "Плюс", ул. Горького, д. 55, оф. 232, тел.: (4012) 76-88-42	<b>Омск</b> ОАО ПП "Медтеоника", ул. Арнольда Нейбура, 100, тел.: (3812) 36-94-21
<b>Белгород</b> ИП "Сычев", Ул. Свободная, д. 34, оф. 5, тел.: (4722) 36-12-97	<b>Кострома</b> ООО "Костромская Медтехника-сервис", ул. Шагова, д. 48 а тел.: (4942) 55-68-01	<b>Пenza</b> ООО "Медсервис", ул. Свердлова, д. 2, оф. 504, тел.: (8412) 32-11-11
<b>Брянск</b> ООО "Брянский медико-технический центр", Ул. Харьковская, д. 14, тел.: (4832) 51-81-46	<b>Курск</b> ООО "Медтехника", Ахтырский пер., д. 7, б, тел.: (4712) 58-87-41	<b>Пермь</b> ООО "Альфа-Медика Пермь" Бульвар Гагарина, д. 706 тел.: (342) 262-05-71
<b>Волгоград</b> ООО "Альфа-Медика Волгоград" Шоссе Авиаторов, 8А, тел.: (8442) 53-22-30	<b>Курск</b> ООО "Вятмедсервис", ул. Московская, 23, тел.: (8332) 357-955	<b>Рязань</b> ООО "Дена-МС", Старообрядческий проезд, д. 1, тел.: (4912) 25-05-57
<b>Волода</b> ООО "Центр медицинского обслуживания", Ул. Предтеченская 31, оф. 406, тел.: (8172) 72-73-88	<b>Киров</b> ООО "Вятмедсервис", ул. Московская, 23, тел.: (8332) 357-955	<b>Самара</b> ООО "Альфа-Медика Самара" ул. Партизанская, 19, 402, тел.: (846) 279-05-96
<b>Воронеж</b> ООО "Искра-Медикал" ул. Ленинградская, д. 57, к. 3 тел.: (4732) 49-53-15	<b>Курган</b> ООО Медкомплект, ул. Куйбышева, 12, оф. 315, тел.: (3522) 41-73-11	<b>Томск</b> ОАО "Медтехника", ул. Источная, 6 тел.: (3822) 51-37-19
<b>Владимир</b> ЗАО "Магазин Медтехника" Суздальское шоссе, д. 65 тел.: (4922) 32-99-29	<b>Красноярск</b> ООО "Микролайф-Регион" ул. Красной гвардии, 21, офис 511 тел.: (9912) 21-02-30	<b>Уфа</b> ООО "Альфа-Медика Уфа", ул. Менделеева, 114/2 тел.: (347) 295-93-19
<b>Екатеринбург</b> ООО "РИОПА", ул. Уральских рабочих, д. 2, оф. 3, тел.: (343) 336-96-96	<b>Краснодар</b> ООО "Восток-Запад", ул. Яна Полуяна, д. 60, тел.: (8612) 21-32-64	<b>Челябинск</b> ООО "Альфа-Медика Челябинск" проспект Победы, 162 Б, тел.: (351) 247-50-56
<b>Ижевск</b> ООО "Медприбор", ул. Ленина, 100 тел.: (3412) 75-20-33	<b>Мурманск</b> ООО "Лазурит", ул. С. Перовский, д. 17, оф. 407, тел.: (8152) 45-23-82	<b>Чебоксары</b> ОАО "Медтехника", ул. Гладкова, 17а, тел.: (8352) 20-41-48
<b>Йошкар-Ола</b> ГУ РМЗ "Сервисный центр Медтехника", ул. Водопроводная,	<b>Нижний Новгород</b> ООО "Ростек", ул. Ильинская, д. 45 а	<b>Волгодонск</b> Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, 14 тел.: (86392) 3-62-92
	<b>Новосибирск</b> ООО "Альфа-Медика Сибирь" ул. Д. Ковальчук, 77,	<b>Ростов-на-Дону</b> Ул. Ленина, 107 тел.: (863) 243-26-83