

DIA

LINE

ЗИМА & ЛЕТО



Производитель: ООО «ДИА», г. Москва, Южная 8, 1/01.

- СОХРАНЯЙТЕ ИНСУЛИН В ЖАРУ И В ХОЛОД
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНИК
- ПРОСТО АКТИВИРУЙТЕ ВОДОЙ
- ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ



Большой чехол

для хранения и транспортировки
инсулиновых ручек, картриджей и флаконов

Инсулиновый чехол для путешествий

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЧЕХОЛ DIALINE™ ОТЛИЧНО СОХРАНЯЕТ СОДЕРЖИМОЕ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО И ХОЛОДНОГО КЛИМАТА.

Чехол DIALINE™ специально разработан, чтобы поддерживать необходимую для переноски и хранения инсулина температуру в течение 45 часов, даже при постоянной температуре окружающей среды до 38°C.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1) внешний чехол; 2) внутренний чехол с секциями, содержащими нетоксичные и негорючие кристаллы.

РУКОВОДСТВО

1. В зависимости от ваших целей погрузите внутренний чехол в воду (холодную или комнатной температуры) на 15 - 30 минут. Чем больше вы будете замачивать чехол, тем дольше он сохранит необходимую температуру, но при этом толщина активированного чехла будет больше.
2. При замачивании мягко сжимайте чехол для равномерного распределения кристаллов в секциях. Если кристаллы намокли неравномерно, распределите их вновь и погрузите чехол в воду еще на некоторое время.
3. Дайте чехлу просохнуть, чтобы образовавшийся гель поглотил избыток влаги из ткани. Аккуратно промокните полотенцем.
4. Положите внутрь содержимое, а затем внутренний чехол поместите в наружный чехол.

Для непрерывного безопасного хранения внутренний чехол DIALINE™ необходимо повторно погружать в воду каждые 45 часов или ранее, если количество геля уменьшается. При непрерывном использовании последующие периоды погружения будут короче, так как кристаллы будут постоянно находиться в форме геля.

DIALINE™ представляет собой испаряющий охлаждающий чехол, ему необходим контакт с воздухом. НЕ ПЕРЕНОСИТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ЧЕХОЛ В ГЕРМЕТИЧНОМ ИЛИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ КОНТЕЙНЕРЕ ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ!

Не помещайте чехол в морозильник, так как вследствие замерзания влаги, содержащейся в геле, можно повредить кристаллы и ткань. Не используйте для нагревания чехла микроволновую печь.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Если Вы не используете изделия, вытащите внутренний чехол и полностью высушите его в естественных условиях, периодически встряхивая. Высыхание может занять 2-4 недели в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы ускорить процесс, можно поместить чехол рядом с источником тепла, повесить на воздухе, разместить в солнечном месте. Не сушить в стиральной машине! Изделие следует стирать вручную в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Хранить в сухом месте.

Производитель: ИП Пархоменко А.Д., 11141, Москва, Коренная 8,1,60,
(495) 543-79-49.

Торговая марка и технология DIALINE™ защищены патентами.

Продукция не требует сертификации. Гарантия 12 месяцев с момента продажи.

© ИП Пархоменко А.Д.